



配戴方式：

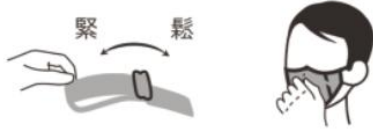

- 調整耳帶，拉日型環單線側放鬆、雙線側收緊
- 戴上口罩並按壓鼻側壓條至貼合臉型

清洗方式：

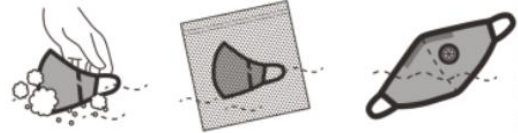

- 建議輕柔手洗，並搭配中性清潔劑雙面搓洗
- 可機洗，唯需套洗衣袋保護，並設定為柔洗
- 清洗時鼻側壓條與氣閥皆不需移除，可一併水洗

着用方法：

- 耳ひものサイズを調整し、両側の「日」字型の線を引いて、顔のサイズに合うよう調整しましょう
- マスクを着けてから、ノーズワイヤーを顔に合う形に調整しましょう

洗浄方法：

- 手でやさしく洗い、中性洗剤で両面をこすることをお勧めします
- 洗濯機で洗えます。洗濯バッグに入れてソフトウォッシュで洗いましょう
- 洗濯の際に、「ノーズワイヤー」と「エアバルブ」は取り外さず、そのまま洗浄できます

氣閥與壓條更換：



- 口罩內側上緣暗袋的右下角缺口，可抽換鋁製壓條
- 氣閥若損壞，將上蓋與底座用力拔開即可拆卸更換
- 安裝氣閥時，請將上蓋與底座用力按壓至咖聲響

其他注意事項：



- 若眼鏡會起霧，可搭配『淨對流-防霧氣密貼』使用
- 口罩壽命請依清洗次數估算，達200次即應丟棄更換
- 請勿乾洗、漂白，並勿以超過攝氏70度烘乾或熨燙

エアバルブとノーズワイヤーの交換：

- マスク内側の上部ポケットの右下の切り欠きは、アルミ製ワイヤーに交換可能
- エアバルブが損傷している場合は上部の蓋とベースをしっかりと引いて取り外し交換します
- エアバルブを取り付けるときは「カチッ」と音がするまで上部の蓋とベースをしっかりと押してください

※仕様変更後のエアバルブ採用のものは、本体に説明書を同梱しておりますのでご確認ください

その他注意事項：

- 眼鏡が曇る場合は、「XPURE ノーズパッド」をセット品として使えます
- マスクの寿命は、洗濯の回数によります。200回ぐらいを目安に廃棄しましょう
- ドライクリーニング、漂白、70℃以上の乾燥またはアイロンはお控えください